

Sitthöjd, modell iChair mc3 (1.612)




Ställa in sitthöjden

Lyftpelare med elektrisk lutning

För att ställa in sitthöjden så ska adapterplattan (1) placeras på följande sätt:




Sitthöjd 45 cm

Sitsramen monteras i adapterplattans (1) understa hål (2) [3]

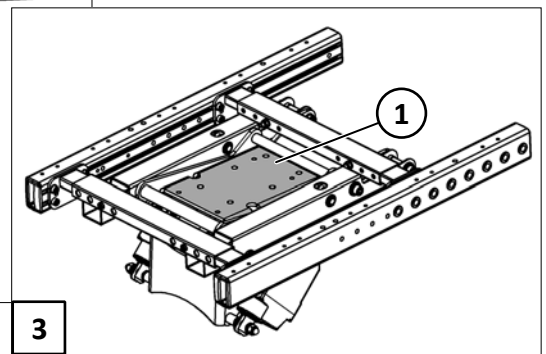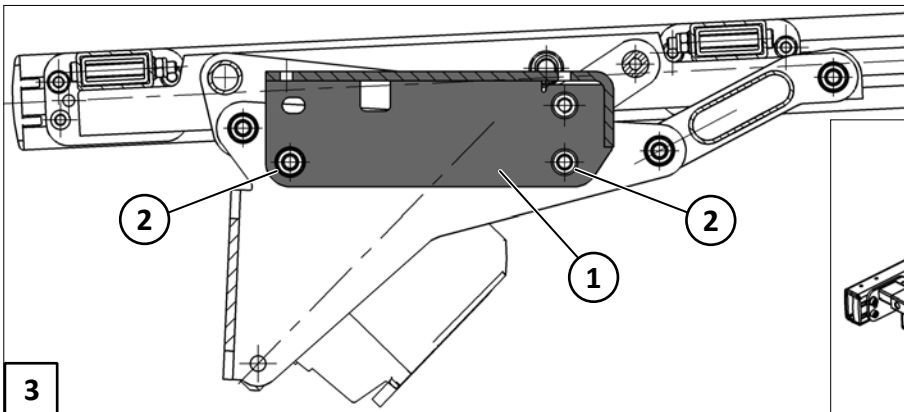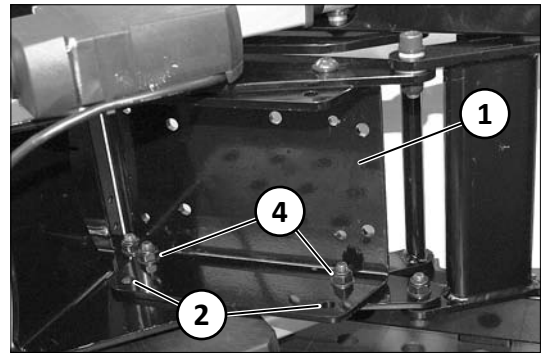



Sitthöjd 48 cm

Sitsramen monteras i adapterplattans (1) översta hål (4) [5]+[6]

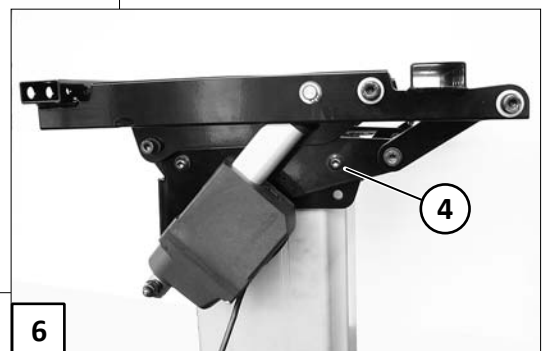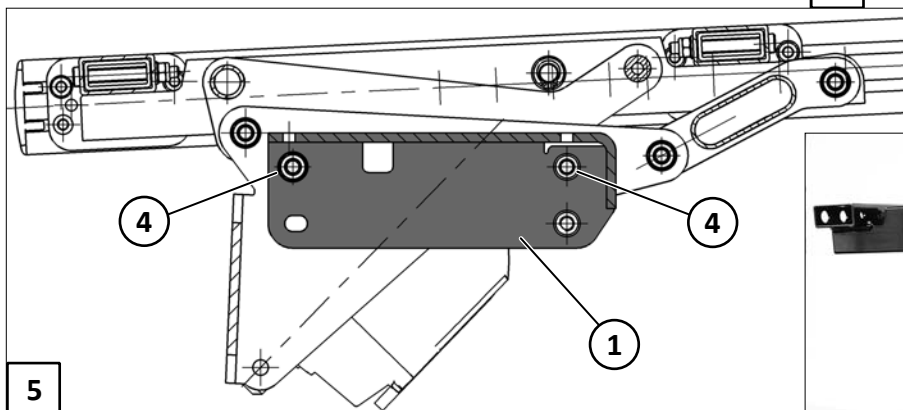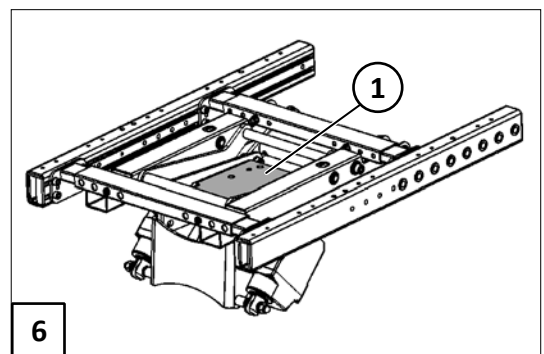

Sitthöjd 51 cm

Vänd adapterplattan (1) vertikalt 180° och montera sedan sitsramen i de nedre hålen (2) [7]+[8].

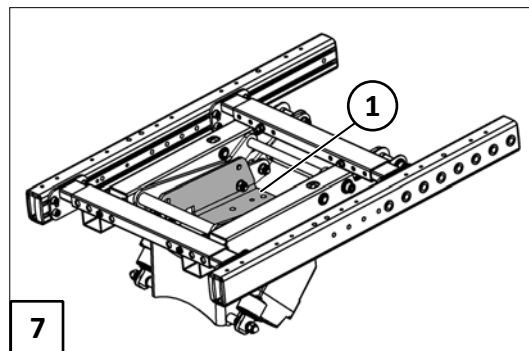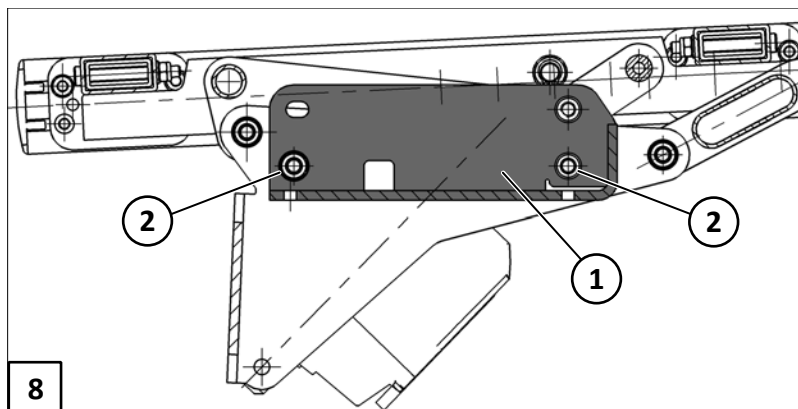

Lyftpelare utan elektrisk sitstilt

För att ställa in sitthöjden så ska adapterplattan (1) placeras på följande sätt:

☞ Sitsramens främre fästhål fästs beroende på önskad sittvinkel i enighet med tabellen <ställa in sitsvinkel> nedan.

Sitthöjd 45 cm



Sitsramens bakre övre fästhål (2) monteras i adapterplattan (1) [3]

Sitthöjd 48 cm

Sitsramens bakre nedre fästhål (4) monteras i adapterplattan (1) [5].

Sitthöjd 51 cm

Vänd adapterplattan (1) vertikalt 180° [6] och montera sedan sitsramens bakre nedre fästhål (4) i adapterplattan (1)

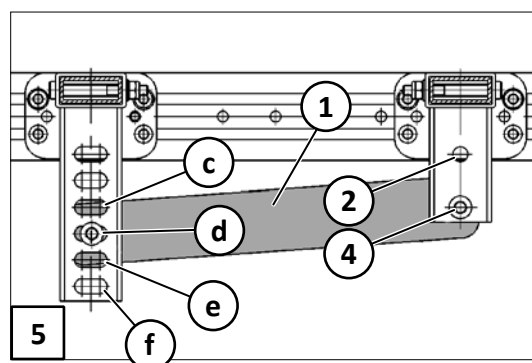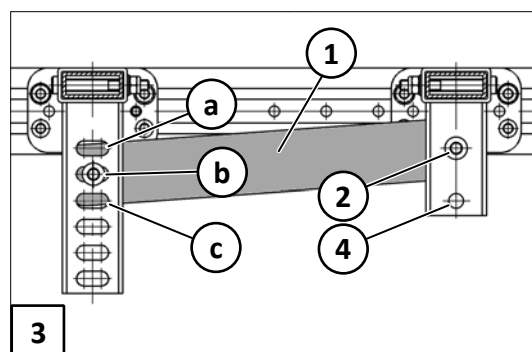

Ställa in sitsvinkeln

Följande sitsvinklar är möjliga genom val av sitsramens främre fästhål:

Sitthöjd	Sitsvinkel			
	0°	4°	8°	12°
45cm	a	b	c	
48cm	c	d	e	
51cm		d	e	f

