

Låsa och låsa upp rullstolen med kombination

Låsa rullstolen med kombination

1. Starta rullstolen
2. Tryck och håll in på/av-knappen tills manöverboxen ger ifrån sig ett pip
3. För nu joysticken framåt tills det hörs ett pip
4. För nu joysticken bakåt tills det hörs ett pip
5. Släpp joysticken, manöverboxen kommer ge ifrån sig ett långt pip
6. Rullstolen är nu låst, om rullstolens startas går den ej att köra och lamporna för manöverboxens gula hastighetsindikator stegar upp och ner

Låsa upp rullstolen med kombination

1. Starta rullstolen
2. För nu joysticken framåt tills det hörs ett pip
3. För nu joysticken bakåt tills det hörs ett pip
4. Släpp joysticken, manöverboxen kommer ge ifrån sig ett långt pip
5. Rullstolen är nu upplåst och går att köra igen

Låsa och låsa upp rullstolen med nyckel (endast för stol med R-net)

Låsa rullstolen med nyckel (artikelnummer H-8106011)

1. Starta rullstolen
2. Stoppa in nyckeln i manöverboxens ladduttag
3. Dra ut nyckeln från ladduttaget
4. Rullstolen är nu låst, om rullstolens startas går den ej att köra och lamporna för manöverboxens gula hastighetsindikator stegar upp och ner



Låsa upp rullstolen med nyckel

1. Starta rullstolen
2. Stoppa in nyckeln i manöverboxens ladduttag
3. Dra ut nyckeln från ladduttaget
4. Rullstolen är nu upplåst och går att köra igen

VR2



R-net

