

**OBS:**

Detta är endast en kort brukarinformation att ha med vid färd.  
Den fullständiga bruksanvisningen skall läsas innan rullstolen får användas!

### mc front



**Luftryck**

Länkhjul 2,5bar (35psi)  
Drivhjul 2,5bar (35psi)  
Däcken har en "Bilventil"

Håll rullstolen ren, kontrollera med jämna mellanrum för bästa driftsäkerhet  
så att luftrycket är rätt och lamporna är fungerande.  
Rengör rullstolen med mild tvållösning.

Max brukarvikt 160 kg


**Med PG Drives elektronik R-net med LCD display**

Rullstol med belysning




## Manöverbox

Laddningskontakt finns i manöverboxens framkant

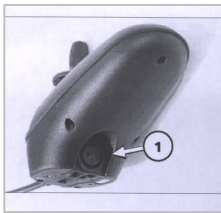


Så här manövrerar du rullstolen:

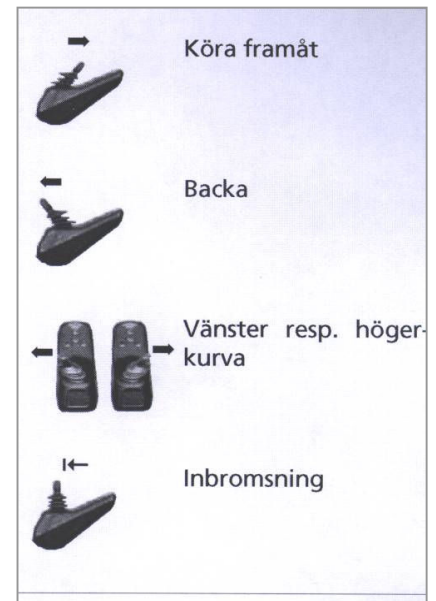

Hastighetsvisare / elförbrukningsvisare GRAFISK

Grundinställd hastighet

Profil

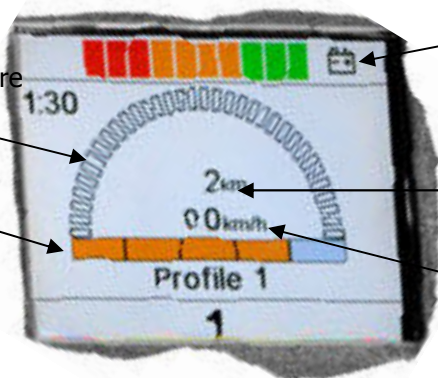

Batteri indikator

Trippmätare

Hastighetsvisare med siffor

Funktionsindikatorn – MODE – styrfunktion, se sidan 4

### Rullstolens mått:

Total bredd: 59 cm

Total längd inkl. benstöd: 113 cm

Total längd exl. benstöd: 83 cm

Höjd med standardsits utan nackstöd: sh 43 = 93 cm / sh 46 = 98 cm

Körsträcka i 6 km/h och nya batterier 73Ah ca 42 km, 45 Ah ca 28 km

Vikt på rullstol med 45 Ah (20H) batterier: 94 kg

Rullstolen godkänd i så kallad klass B för begränsat utomhusbruk.

**Nödbromsning:** Släpp joysticken/manöverreglaget och rullstolen bromsas.

Notera att när man trycker PÅ/AV knappen så bryts kontakten först när man släpper fingret från knappen!

## Låsfunktion:

### Aktivera låsfunktionen:

1. Rullstolen måste vara påslagen:
2. Tryck på/av-knappen till det hörs en signalton.
3. För joysticken framåt till det ljuder en signalton.
4. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
5. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nolläget (mittenläget), då stängs elektroniken av och man hör en lång signalton.
6. Låset är aktiverat

När du trycker på rullstolen går den inte att köra, man ser symbolen nedan i displayen.



### Koppla ur låsfunktionen:

1. Tryck På/Av-knappen
2. För joysticken framåt till det ljuder en signalton
3. För joysticken bakåt tills det ljuder en signalton
4. Släpp joysticken så att den går tillbaka till nolläget (mittenläget), då stängs elektroniken av och man hör en lång signalton.
5. Låset är urkopplat

## Kontroller för körning

När manöverboxen kopplats på visar batteriindikeringen batterispänningen efter systemtestet. Med avtagande batterispänning lyser färre ljusegment hos batteriindikeringen.

Färgernas betydelse:

Grön = Batterierna laddade

Gult = Laddning rekommenderas

Rött = Batterikapaciteten är nästan eller helt slut, omedelbar laddning krävs.




### Felindikering

Rullstolen har ett inbyggt felsökningsystem som kontrollerar viktiga funktioner. Skulle elektroniken upptäcka ett fel indikeras detta i displayen (15) genom en Error-code (felkod) som hjälper Er att hitta problemet, se tabellen nedan.




- (a) Visar orsak
- (b) Visar Error-code

Error-code	Felorsak
1E01	Batteriladdare ansluten
2C00	Batterierna urladdade
1505	Magnetbroms urkopplad
1506	
3800	Motor eller kontakt defekt
3C00	

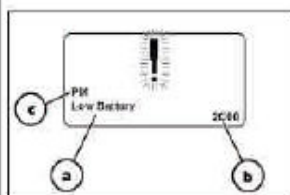

- (c) Visar var felet är

Visar	Felkälla
JSM	Joystickmodul
PM	Elektronik- powermodul
ISM	Ljus-ställdonsmodul
STLM	Ljus-styrmodul
DUAL	Vårdarstyrningen

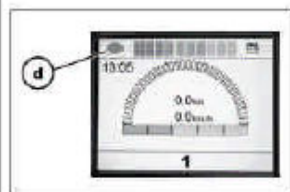

- (d) Visar orsak

Display	Orsak
	Överbelastning av motorena

### MODE funktionen

1



Funktionen på ställdonen regleras enligt följande:

När **MODE** knappen har tryckts

- Joystick åt höger växlar till nästa funktion

2



- Joystick åt vänster växlar till förra funktionen

- Joystick framåt ökar funktionen

- Joystick bakåt minskar funktionen

3



Funktionernas ordning

- 1 Ryggstödsvinkling

4



- 2 Sitslutningen

- 3 Benstödsvinkling höger och vänster

5



- 4 Benstödsvinkling höger

- 5 Benstödsvinkling vänster

6



**Sitslyft**

