

Läs igenom snabbguiden innan du använder iChair elrullstol med Z-styrning d v s vårdstyrning.
Träna på att köra elrullstolen tom på en öppen plats när du lär dig att köra med Z-styrning.
Prova sedan hur det känns att själv sitta i rullstolen och bli körd innan du kör någon annan i stolen.
Detta ger dig, som kör, en bättre känsla för hur det kan kännas att sitta i elrullstol och bli körd.




Lyft ALDRIG elrullstolen i Z-styrningen

- Lyft EJ elrullstolen i stöd-/säkerhetsbågen.
- Belasta inte Z-styrningsbågen med väskor eller dylikt.

Låt elektroniken göra jobbet!

Använd EJ vårdstyrningen som manuell hävstång, då belastas ryggrören och styrordningen kan deformeras.

Kontrollera alltid att joystickens styrpinne sitter i Z-styrningens spår, se bild.

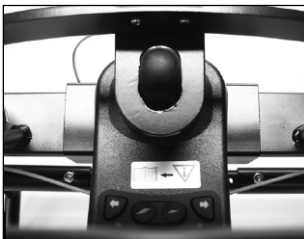

- Joystickens styrpinne ska vara centrerad i Z-styrningens spår.
- I viloläge får styrpinnen ej vara i kontakt med sidorna.
- Om joysticken inte sitter i Z-styrningens spår får rullstolen EJ ANVÄNDAS!
Då är vårdstyrningen felmonterad eller defekt.

PÅ- och AV-knappen (on/off) sitter på manöverboxen.

Vid dubbelkommando sitter PÅ- och AV-knappen på den främre manöverboxen.

Höjdställning

Z-styrningen går att reglera och justera i höjd för att få den individuellt inställd i höjd. **Kom ihåg att stänga av rullstolen när du ska justera höjden!**

- Håll stödbågen (3) och dra sedan i vajern (5) som lösgör spärrarna i mekanismen. Förändra höjden på körbågen genom att föra körbågen till önskad höjd, släpp sedan vajern.
- Försäkra dig om att de två spärrarna i mekanismen sitter i varsitt håll (6). Mekanismen har 6 st valbara höjdlägen för körbågen.

Fällning



Det är bra att fälla Z-styrningen om man ska in i ett trångt utrymme eller om man ska frakta stolen i t ex en bil.

Stäng alltid av rullstolen vid fällning av Z-styrningen!

- Dra i vajern (5) och för körbågen nedåt till lodrätt läge (8). Håll i skyddsbågen (2) så att den ej faller ner.

OBS!

Vårdarstyrningen får ej vara aktiv eller användas i nerfällt läge.

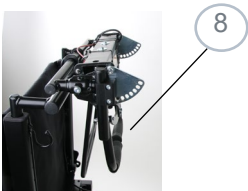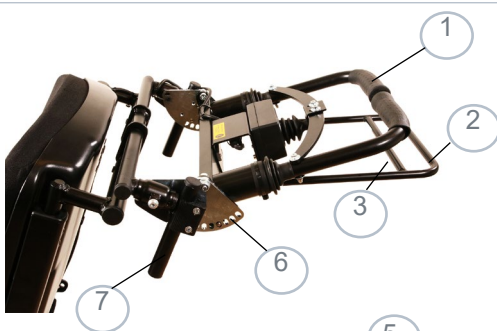



Körhandtag och stöd/säkerhetsbåge

Att köra med vårdarstyrning

Starta rullstolen, vänta 5 sek.

- Då rullstolen ska köras trycks körhandtagen (1) mjukt nedåt mot stöd-/säkerhetsbågen (2).
- Håll fingrarna runt stöd-/säkerhetsbågen och kläm åt (9).
- För att svänga förs körhandtagen (1) åt sidan. För att svänga åt höger för körhandtagen åt vänster och tvärtom för att svänga vänster.

Kom ihåg att släppa taget om stöd-/säkerhetsbågen (2) när du ska svänga!



Vid körning med Z-styrning, greppa tag om stöd-/säkerhetsbågen

- För att backa lyfts körhandtagen (1) mjukt uppåt. För körhandtagen åt det håll du vill backa. Om du vill backa åt vänster, förs körhandtagen åt vänster och tvärt om för höger. Var uppmärksam så att du inte backar in i någonting!


Z-styrningen är utrustad med en förlängd stödbåge (2) för att förhindra att du fastnar med händerna mellan kroppen och körhandtagen. Tack vare det kan körhandtagen fortfarande tryckas nedåt och du kan köra framåt om du skulle backa in i någonting.

OBS!

Om ni ska in i ett trångt utrymme, toalettbesök eller liknande, **stäng av elrullstolen!**

Fäll ner vårdstyrningen i lodrätt läge (8). Frikoppla motorerna, se vidare elrullstolens bruksanvisning, för att kunna styra elrullstolen som en manuell rullstol.


Frikoppla ALDRIG elrullstolen i en lutning eftersom du inte orkar hålla tyngden från både rullstolen och brukaren!

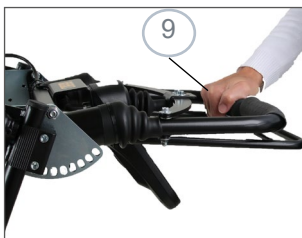

För komfortkörning och jämnare hastighet, håll i stöd-/säkerhetsbågen när du kör

TIPS!

När ni ska gå längre sträckor är det bra att ställa in en lämplig gånghastighet på hastighetsregalget, se vidare bruksanvisningen för manöverboxen. Tryck körhandtagen mjukt nedåt mot stöd-/säkerhetsbågen och håll i den. Därigenom fås en jämn hastighet, bra körkomfort för brukaren samt avlastning i axlarna för den som kör rullstolen.

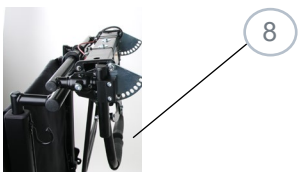

Om du upplever att det går för fort när ni är ute och kör eller att det inte går som ni vill – **släpp körhandtagen!** Då stannar stolen.



Viktigt att tänka på!

Generellt för alla modeller av elektroniker gäller att man inte får köra/röra manöverboxen/körbågen innan elektroniken har säkerhetstestat alla funktioner. Skulle du röra körbågen innan testen är utförd flaggar elektroniken fel i displayen. Stäng då av genom att trycka på av-/påknappen (4) och starta stolen på nytt.

Z-styrningen är framtagen för att man ska köra utomhus. Undvik att köra i trånga utrymmen. Var extra försiktig när du backar in i hiss eller när du backar mot en vägg. För att undvika att man fastnar mellan rullstolen och väggen, finns skyddsåsen (2) som möjliggör att du kan släppa dina händer från vårdstyrningen och att rullstolen därmed stannar.

*Var försiktig när du kör rullstolen på lyftramp t e x färdtjänstbuss så att du inte kommer åt körhandtagen och kör av rampen. **Stäng alltid av elrullstolen under lyft.***