





Netti V Allround


När inställningen har betydelse

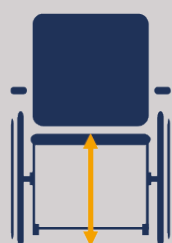


+100 mm

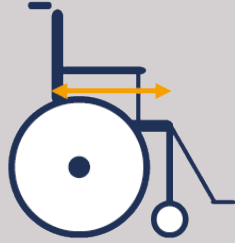


+175 mm

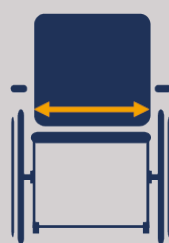

+50 mm

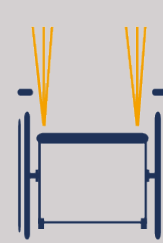

A, V, H

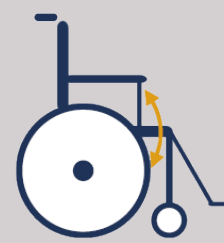

-3° - +20°

FÖRÄNDRAS MED DIG

Unika justeringsmöjligheter ger flexibel anpassning av varje rullstol efter användarens behov och funktionsnivå. Oftast utan att lägga till extra delar.

Behovet av 16" hjul är ett minne blott. Lagerhållning, service, rekond och återanvändning av Netti V Allround underlättas markant då rullstolen med standard 24" hjul kan justeras från sitshöjd 386 - 486 mm.



UNIK STABILITET OCH BALANS

Justerbar tyngdpunkt och hjulbas för optimerade köregenskaper och manövrerbarhet.

Den unika ramdesignen med justering av balanspunkt och hjulbas säkerställer optimala köregenskaper.

Detta resulterar i rätt hjulposition för handdrivning till den aktiva användaren. Dessutom säkerställer balanspunktsoptimeringarna att rullstolen är lätt att tilta även för användare som själva använder tiltningen.



Hjulbas

Drivhjulen kan justeras bakåt med 125 mm för optimala köregenskaper och stabilitet.



Sättesbalans

Sitsen kan justeras steglöst ovanpå ramen för perfekt balansering av stolen.



Tilt

-3° - 20°

FLEXIBLA INSTÄLLNINGAR

En rullstol för alla aspekter av livet.

Netti V Allround är framtagen för att kunna anpassas till många olika användare med samtidig åtanke för lagerhållning och recirkulering för hjälpmedelscentralerna.

En Netti V Allround med 24" hjul i sittbredd 450 mm kan därför justeras helt utan ytterligare delar från sitthöjd 386 - 486 mm, sittbredd 450 - 500 mm samt ett sitsdjup om 375 - 550 mm.

Med stort tiltomfång och reglerbar rygg höjd är Netti V Allround mycket flexibel och anpassningsbar.



Sitsdjup

Sitsdjup 375 - 550 mm
steglöst justerbart.
Ryggstödet kan flyttas
25 mm bakåt/framåt.



Ryggvinkel

90° - 125°



Sittbredd

+ 50 mm
Verklig sittbredds-
flexibilitet i sätet,
ben och rygg.



Sitshöjd

100 mm flexibilitet
i sitthöjden från
386 - 486 mm
med standard 24" hjul.

Totalt 169 mm
flexibilitet i sitthöjden
genom att ändra hjulstorlek.

ANPASSNINGSBAR

JUSTERINGAR FÖR PERFEKT PASSFORM

- ✓ Justerbar till olika kroppsformer
- ✓ 50 mm benabduktion

ASYMMETRIKOMPENSATION

Sidojusterbart huvudstödsfäste, asymmetriska ryggrörspositioner samt individuellt breddjusterbara benstödsfästen ger stor flexibilitet i anpassning till varje individs behov.

STABILISERING AV ÖVERKROPPEN

Justerbara ryggband och justerbara ryggrör (V-, A- eller H-form) ger användaren bästa möjliga stöd.

TRYCKAVLASTNING

Ergonomiska gångjärnspunkter vid höfter och knän minskar risken för att användaren glider framåt och minimerar skjuvningskrafterna.

EL-FUNKTIONER

Netti V Allround kan utrustas med elektriska funktioner för ryggvinkel, sitsvinkel samt benstöds vinkel.



Justerbara ryggband för optimal passform och möjlighet att anpassa ryggrören till olika bålformer.



Asymmetrisk huvudstödsposition möjligt



Integrerad 50 mm abduktion av ben

SPECIFIKATIONER

Netti V Allround

Sittbredd	350 mm (-400 mm), 400 mm (-450 mm), 450 mm (-500 mm), 500 mm (-550 mm)	Tilt	-3° - 20°
Totalbredd med standardhjul (24+7")	Sittbredd +190 mm	Ryggvinkel	90° - 125°
Möjlig sitshöjd från golv till sitsplatta	345 - 514 mm	Armstöds höjd (från sitsplatta till armstöd)	185 - 325 mm
Sitsdjup	375 - 550 mm	Total längd - med ryggstöd och benstöd i vertikalt läge och säte i horisontellt läge	1,000 - 1,200 mm
Rygg höjd	515 - 613 mm	Transportlängd utan benstöd	780 mm
Max. användarvikt	136 kg	Svängradie, med benstöd i vertikalt läge	666 - 702 mm
Max. användarvikt för biltransport	136 kg	Krocktestad	Enligt ISO-7176-19:2022



 **Netti[®]** V Allround

I Sverige är L&B Medical återförsäljare för

 **MEYRA[®]**
GROUP



www.lbmedical.se