

## Ställa in sittdjupet via ryggstödet position


### Ryggstödet position

#### Modell iChair MC1/MC2/MC3 (1.610/1.611/1.612)

Det går att ställa in sittdjupet genom att justera ryggstödet.

Efter demonteringen av de tre fästskruvarna per sida så kan ryggstödet, beroende på utförande, ortoflex eller ergoseat, placeras i enlighet med tabellen nedan.

- ☞ Det oanvända monteringshålet (X) är försett med ett skyddslock.

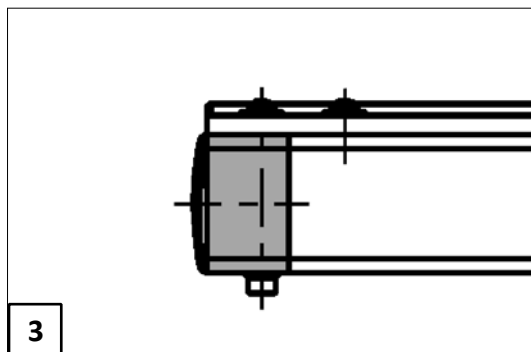


### Sittdjupsförlängning

Med sittdjupsförlängningen [3] instucken framifrån i sittprofilröret så förlängs det inställda sittdjupet 3cm.

Tabell: Sittdjup – ryggstödet position							
Sittdjupe[cm]	40	43	46	49	53	56	
Position med ortoflex [1]	3	4	5	6	7	7 med sittdjups- förlängning [3]	
Position med ergoseat [2]	4	5	6	7	8	8 med sittdjups- förlängning [3]	
☞ Positionsnumret anger position för det bakre hålet på ryggfästet (a)							

### Utförande: Enkel-/Ortoflexrygg

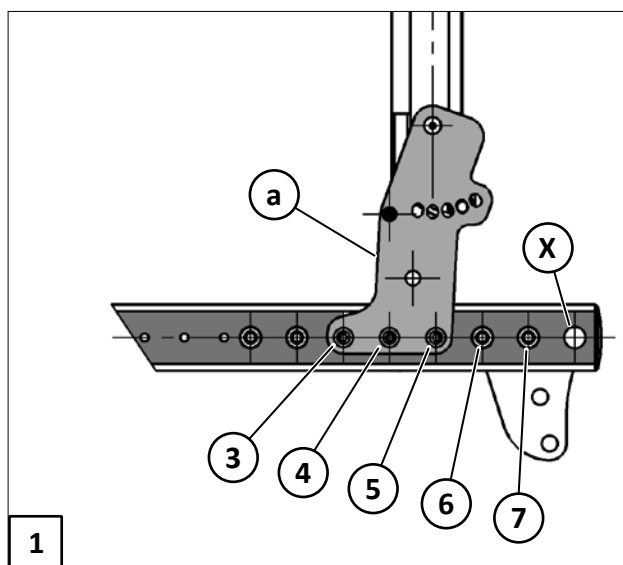

### Utförande: Ryggskål, Ergoseat och mySeat

